

# KÄYTTÖOHJE

*SHOPRIDER®*

UL8WFE



## JOHDANTO

Onnittelut hyvästä valinnasta. Shoprider- kompakti sähköpyörätuoli on täydellinen yhdistelmä tyyliä ja mukavuutta. Sen ominaisuudet ovat ,erittäin kevyt kuljetukseen soveltuva purettava rakenne , helppo käsiteltävyys , tasainen ajon kontrollointi . Laite soveltuu reinomaisesti nykypäivän aktiiviseen elämäntapaan.

Käyttö selkeällä ohjelmoitavalla joystic-ohjaimella ,hyvin suunniteltu pyörätuenta jakaa painon tasaisesti kaikille tukipyörille antaen tukevan ajotuntuman . Käyttöltään selkeän yksinkertainen täydellinen sähköpyörätuolipaketti tarjoaa moniksi vuosiksi vapauden omatoimiseen liikkumiseen.

Tämä käyttöohje sisältää tärkeää tietoa turvallisesta käytöstä omasta Shoprider pyörätuolistanne. Lukekaa tämä ohjeet tarkasti ja huolellisesti ennen kuin käytätte sähköpyörätuolia ja varmistakaa, että olette ymmärtäneet kaikki ohjeet.

## VAROITUS ULKOPUOLISEN SÄHKÖMAGNEETTIKENTÄN VAIKUTUKSESTA

EMI on sähköisen magneettikentän vaikutus (Electro-Magnetic Interference) Magneettikentän muodostava energia signaali voi olla peräisin mistä tahansa esim. puhelin- tai radioyksiköstä .Tällaiset signaalit voivat mahdollisesti aiheuttaa häiriötä toiseen elektroniseen yksikköön lähellä käytettäessä . Tällainen mahdollisuus on myös sähköpyörätuolilla.

Tästä muistutetaan varoituskyllillä EMI-RFI .

**ÄLÄ KÄYTÄ PUHELIN-TAI RADIOLÄHETTIMIÄ VIRRAN OLLESSA KYTKETTYNÄ SÄHKÖSKOOTTERISSA.**

Koska ei ole taattavissa varmaa häiriötöntä käyttöä.

**TÄMÄ TUOTE ON TUKITTU JA HYVÄKSYTTY TURVALLISEKSI VASTUSTASOLLA 20 V/M.**

**HUOM !!!**

**AINA HÄITIÖTAPAUKSISSA SÄHKÖSKOOTTERIN KÄYTTÄYTYMISESSÄ KYTKE HETI VIRTAA POIS JOYSTICIN VIRTAKYTKIMESTÄ.**

## TURVAOHJEET

Käyttäessänne sähköpyörätuolia rohkeasti elämän aktiviteettien lisäämiseen on kuitenkin otettava huomioon muutamia sääntöjä, joilla varmistetaan käyttöturvallisuus :

- Älä käytä sähköpyörätuolia tutustumatta tähän ohjekirjaan.
- Älä ylitä sähköpyörätuolikuormalle annettuja nousujyrkkyyksiä.
- Käytä ohjainta tutulla ja hallitulla tavalla, kun ajat ylös tai alas rinnettä.
- Älä kuljeta matkustajia tai ylitä laitteen enimmäispainoa ( tekniset tiedot).
- Älä sammuta ohjainpainikkeella (päälle / pois ) suoraan ajonopeudesta koska tällöin magneettijarru voi kytkeytyä arvaamattomasti sekä ohjainyksikkö voi vaurioitua.
- Varo erityisesti kuoppia ja pehmeitä maastokohtia (pehmeä hiekka, löysä sora pitkä ruoho jne.).
- Älä ylitä yli 5 cm:n estettä.
- Älä asenna tai irrota käyttökytkinkahvaa ellei sähkömagneettiset jarrut ole päällä ja ohjain kytketty pois päältä.
- Älä käytä sähköpyörätuolia jos pyörät on vapaa vierintätilassa.
- Älä käytä ajoneuvoväyliä kuin pakkotilanteessa . Muista olevasi jalankulkija joten käytä jalankulkijoille osoitettuja väyliä.
- Jos mahdollista, siirry ajoneuvon omalle istuimelle ajoneuvokuljetuksessa.
- Älä ylitä nousu/lasku kulmaa yli 6 astetta (10%).
- Pysäytä täysin ennen kuin vaihdat eteen- tai taakse suuntaa.
- Aja varovasti hitaasti aloittaen alamäessä
- Aina esteen lähestyessä hillitse nopeutta.
- Aina jyrkissä kaarteissa hillitse nopeutta.
- Käytä aina turvavyötä.
- Pidä jalat jalkatuella ajonaikana.
- Varmista aina, että akut on ladattu täyteen ennen lähtöä matkalle.
- Varastointi kuivassa ja ilmastoidussa tilassa suojaa laitetta.
- Tarkista ennen istumista että pyörät eivät ole vapaa-tilassa.
- Jarruttamaan hätätilanteessa yksinkertaisesti vapauttamalla ohjainvipu.
- Pidä aina sähköpyörätuolisi huollettuna huollettu asianmukaisesti sekä tarkista itse laite silmämääräisesti.
- Asenna istuin mahdollisimman pystyasentoon aina nousuissa.

## TÄRKEÄÄ

Shoprider Powerchair on suunniteltu auttamaan yksilöllisesti liikkuvuuden tarpeisiin. Kaikki käyttö vastoin ohjeita ja tarkoituksenmukaisuutta saattaa vahingoittaa sähköpyörätuolia tai voi aiheuttaa vammoja käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Älä nosta pyörätuolia käsinojista ja pidä käsinojat alhaalla ajettaessa.

### Ensimmäinen käyttökerta

Varmista akkujen lataustila- lataa akut (katso akun lataaminen).

Lataus voi kestää jopa 12 tuntia. Lataa akut täysin ennen käyttöönottoa.

## JOYSTICK-OHJAIN (vsi)

1. Päälle / pois-kytkin. Älä käytä kytkintä tehon rajoitukseen kuin hätätilanteessa.  
2. Akun varaustila: Tämä on 10-segmentin näyttö, joka osoittaa, onko virta päällä ja ilmoittaa akun varaustilan.

Lisäksi valo ilmoittaa sähköpyörätuolin mahdolliset viat. (katso taulukko)

3. Nopeus ilmaisim: Tämä on viiden (5) segmentin näyttö, joka osoittaa valitun enimmäisnopeuden.

4. Äänimerkki-painike

5. Nopeuden hidastus.

6. Nopeuden lisäys.

7. Joystick (ajovipu-nopeus ja suunta).

Työnnä ohjainta suuntaan minne haluat mennä.

Mitä pidemmälle työnnät sen suurempi nopeus.

Vapauttaminen automaattisesti kytkee magneettijarrun.


8. Latausportti:

Tämä on ensisijainen latauksen portti.

Työnnä pistoke nuoli ylöspäin latausporttiin.

Käytä vain hyväksytyä laturia (Shoprider).

Huom: Ajo-ohjain voidaan asentaa sopivaksi joko oikea- tai vasenkätiselle käyttäjälle. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi ja pyydä tarvittaessa lisäapua.

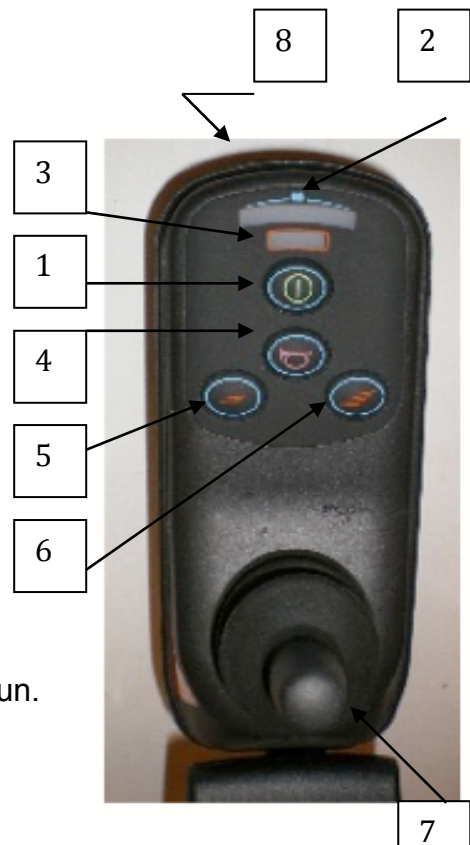

## LUKITSEMINEN / Joystick

Ohjainyksikkö voidaan ohjelmoida lukituksi mode-toiminnolla luvattoman käytön estämiseksi. Lukitussuoritetaan näppäinpainallussarjalla ja ohjainliikkeillä seuraavasti.

Voit lukita sähköpyörätuolisi ohjaimen :

Säätimen ollessa päällä, paina ja pidä - päällä / pois painiketta.

1 sekunnin jälkeen ohjain piippaa. Päästä päälle / pois painike.

Ohjaussauva työnnetään eteen, kunnes ohjain piippaa.

Paina ohjainta taaksepäin kunnes ohjain taas piippaa.

Vapauta ohjain, kuuluu pitkä piippaus. - Laite on nyt lukittu.

Voit avata laitteen seuraavasti:

Kytke päälle / pois painike. Nopeus indikaattori välkkyä ylös ja alas.

Ohjaussauva työnnetään eteen, kunnes ohjain piippaa.

Paina ohjainta taaksepäin kunnes ohjain piippaa.

Vapauta ohjain, kuuluu pitkä piippaus. - Laite on nyt auki.

LEPOTILA: Jos laite on päällä ja sitä ei käytetä yli minuutin, ohjain automaattisesti menee lepotilaan. Tästä varoittavana merkinä akun merkkivalon hidaskäyminen.

Käännä säädin pois päältä ja takaisin päälle kytkeäksesi uudelleen..

Ääriimitat pituus x leveys x korkeus sis. jalkatuen	mm	870 x 580 x ...
Rengaskoko	tuuma	Etu 2 x 6 Taka 2 x 8
Kokonaispaino -akkuineen	41,8 kg	Istuin , yläosa 16,4kg Akkukotelo, jalkatuki 12,4 kg Moottoriososa 13,0 kg
Käyttäjän enimmäispaino	kg	113
Akkukapasiteetti	V_Ah * kpl	24 V 12 Ah vastaava Litium rauta fosfaatti - akku
Laturi	Amp	2A ylilataussuojalla
Moottorin teho ( teoreettinen )	W	336
Huippunopeus -tasaisella, opt. olosuhteet	Km/h	5...6
Ajomatka latauksella	Km	12...14 kuorma, lämpötila ja olosuhteet rajoittavat

#### VASTUUVAPAUTUS LAUSEKE

Tämä sähköpyörätuoli ei ole tarkoitettu sellaisenaan käytettäväksi henkilöille joilla on fyysisiä rajoituksia, jotka voivat estää turvallisen käytön. Shoprider, maahantuojaja sekä jälleenmyyntiketju sanoutuu irti kaikesta vastuusta loukkaantumisiin tai omaisuusvahinkoihin, joita ovat seurauksena tuotteen väärästä tai vaarallista käytöstä . Takuu on voimassa vain silloin, kun käytetään aitoja Shoprider osia. Kaikki muutostyöt ilman Shopriderin/ maahantuojan lupaa mitätöivät takuun. Takuu ei kata kuluja osia.

Edellisten ohjeiden tarkoituksena ohjata sähköpyörätuolin turvalliseen käyttöön . Jos sinulla on kysyttävää laitteen käytöstä ota yhteys palvelun tarjoajaan.

Valmistaja: PIHSIANG MACHINERY MFG.CO.,LTD - TAIWAN  
Maailmanlaajuisesti patentoitu.

Maahantuonti:  
Kuusiluoto Oy  
0401244282  
info@apuajoneuvo.fi

Huolto ja varaosat:  
Kehittäjänkatu 16  
04440 Järvenpää  
0401244282

Osittainkin kopiointi kielletty ilman Kuusiluoto Oy:n lup

## PURKU JA KASAUSOHJE KULJETETTAVAKSI



1. KÄÄNNÄ SELKÄNOJA ISTUINTA VASTEN JA KYTKE VIRTA POIS.
2. IRROITA OHJAIMEN KÄYTTÖKAAPELI VETÄMÄLLÄ RUNKO-OSASTA LIITIN AUKI.
3. LÖYSÄÄ ISTUIMEN KIRISTYS PULTTI JA NOSTA ISTUIN YLÖS .
4. KATKAISE RUNKO-OSA VETÄMÄLLÄ Keltaisesta SORMIKAHVASTA JA TAITA OSAT IRTI TOISIATAAN
5. KASAUS VASTAAVASTI PÄINVASTAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ